

VARISAN[®]



CATALOGUE DE VENTE 2020



VARISAN PREMIUM



Gamme Semi-transparent Éthéré

Gamme top ventes
98% des morphologies

ETHÉRE	PIED FERMÉ	CLASSE 1 10-15 mmHg p.38	MI-BAS	Beige	Noir					
			BAS	Beige	Noir					
			COLLANT	Beige	Noir					
		CLASSE 2 15-20 mmHg p.43	MI-BAS	Glacé	Beige +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Daim	
			BAS	Glacé	Beige +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Daim	
			COLLANT	Beige	Poudré	Nacré	Daim	Gris	Taupe	
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.46	MI-BAS	Beige	Terra	Noir				
			BAS	Beige	Terra	Noir			Picots	
			COLLANT	Nacré						
		CLASSE 3 20-30 mmHg p.72	MI-BAS	Beige	Noir					
			BAS	Beige	Noir				Picots	
			COLLANT							
PLUMETIS	CLASSE 2 15-20 mmHg p.48	MI-BAS	Noir	Rose	Marine	Argenté		NOUVEAU		
		BAS	Noir	Rose	Marine	Argenté		NOUVEAU		
		COLLANT	Noir	Rose	Marine	Argenté		NOUVEAU		
MATERNITÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.50	COLLANT	Nacré	Taupe	Noir					



Gamme Homme Passo Elle&Lui

Peaux sensibles & Thermorégulation

ELLE & LUI	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.68 / p.80	MI-BAS	Beige	Gris	Marine	Noir					
			MI-BAS	Noir						32% coton		
			MI-BAS	Noir								
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.69 / p.81	MI-BAS	Noir								
			CLASSE 2 15-20 mmHg p.66 / p.78	MI-BAS	Beige +/-	Chiné +/-	Gris +/-	Chiné +/-	Bleu +/-	Chiné +/-	Brun +/-	Noir +/-
					Moutarde	Rouge	Vert	Bleu				
PASSO	CLASSE 3 20-30 mmHg p.75 / p.86	MI-BAS	Noir +/-						Soie + Coton			



Gamme Transparent Diva

Douceur
Résistance

DIVA	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.52	MI-BAS	Naturel +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Noir	
			BAS	Naturel +/-	Poudré +/-	Nacré +/-	Terra +/-	Noir +/-	
			COLLANT	Naturel	Poudré	Nacré	Noir		
		PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.56	MI-BAS	Nacré				
				BAS	Nacré +/-				
				COLLANT					
	MILANO	CLASSE 2 15-20 mmHg p.58	COLLANT	Gris	Noir				
	PAPILLON	CLASSE 2 15-20 mmHg p.59	BAS	Nacré	Noir			NOUVEAU	

+ Existe en taille +
cuisses et mollets forts

- Existe en taille -
cuisses et mollets fins



Gamme Opaque Naturel Soie Seta Micro-coton

Peaux sensibles & Thermorégulation

SOIE	CLASSE 2 15-20 mmHg p.61 / p.82	MI-BAS	Taupe	Prune	Gris	Noir			
		BAS	Taupe	Prune	Noir			Picots	
		COLLANT	Taupe	Prune	Noir			24% soie	
	CLASSE 3 20-30 mmHg p.73 / p.89	MI-BAS	Noir						
BAS		Noir					Picots		
SETA	CLASSE 2 15-20 mmHg p.62	MI-BAS	Moutarde	Rouge	Marine	Orange	Noir		
		BAS	Orange	Noir				13% soie	
		COLLANT	Rouge	Orange	Noir				
MICRO-COTON	CLASSE 1 10-15 mmHg p.39	MI-BAS	Noir						
		CLASSE 2 15-20 mmHg p.64 / p.83	MI-BAS	Beige	Noir				45% coton
			BAS	Beige	Noir				Picots
		COLLANT	Beige	Noir					



VARISOFT ACCÈS AUX SOINS



Gamme Varisoft
Semi-opaque

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS FÉVRIER 2020

SEMI-OPAQUE	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Poudré	Noir
			BAS	Poudré	Noir
			COLLANT	Poudré	Noir
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Poudré	Noir
			BAS	Poudré	Noir



Gamme Varisoft
Transparent

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

TRANSPARENT	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Doré	Noir
		BAS	Doré	Noir
		COLLANT	Doré	Noir



Gamme Varisoft
Mesures adaptées
Hospitalier



Gamme Varisoft
Homme
Côtelé

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

MESURES ADAPTÉES	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Beige	Nacré	Terra	Taupe	Noir	
			BAS	Beige	Nacré	Terra	Taupe	Noir	Picots
			COLLANT	Beige	Nacré	Noir			
	PIED OUVERT	CLASSE 3 20-30 mmHg	BAS	Beige	Noir	Picots			
			MI-BAS	Beige	Noir				
			BAS	Beige	Noir	Picots			
DENTELLE	CLASSE 2 15-20 mmHg	BAS	Nacré	Noir					

HOMME	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Noir
-------	------------------------	--------	------



VARISAN PATHOLOGIE



Cédème veineux

DEMA	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Poudré	Noir	NOUVEAU
		MI-BAS	Poudré	Noir	Cédème veineux

Sclérose des varices

VEINALGIC® p.116	MOLLET ET CUISSE	Noir	Blanc
------------------	------------------	------	-------

Anti Thrombo-Embolique

A.T.E. POST-OP	CLASSE 2 15-20 mmHg	MI-BAS	Blanc	BAS	Blanc	Usage bloc opératoire
----------------	------------------------	--------	-------	-----	-------	-----------------------

Code client :

Délégué(e) :

Email :

Tel :



MI-BAS

Ethéré, Diva

	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville (b)	16-18		18-20			20-23			23-26			26-29		29-32
Mollet (c)	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur (AD)	court ≤ 37 / normal > 37													

Soie, Seta, Elle & Lui

T5 exclu
Elle & Lui

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville (b)	19-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet (c)	32-36	36-40	40-44	44-48	46-52
Hauteur (AD)	court ≤ 40 / normal > 40				

Passo

	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville (b)	18-21		21-24			24-27			27-30			30-33	
Mollet (c)	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur (AD)	court ≤ 40 / normal > 40												

DEMA®

	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville (b)	16-18		18-20			20-23			23-26			26-29		29-33
Mollet (c)	26-29	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur (AD)	court ≤ 37 / normal > 37													



BAS

Ethéré, Diva

	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville (b)		16-18			18-20				20-23			23-26			26-29		29-32	
Cuisse (g)	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur (AG)	court ≤ 74 / normal > 74																	

Soie, Seta

	T1	T2	T3	T4
Cheville (b)	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse (g)	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur (AG)	court ≤ 74 / normal > 74			



COLLANT

Ethéré, Diva

	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville (b)	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse (g)	37-52	36-63	36-66	49-69	52-72	62-78
Ventre (t)	≤ 105		≤ 130			-
Hauteur (AG)	court ≤ 74 / normal > 74					

Maternité

	T1	T2	T3	T4
Cheville (b)	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse (g)	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre (t)	≤ 120	≤ 135	≤ 150	≤ 160
Hauteur (AG)	court ≤ 74 / normal > 74			

Soie, Seta

	T1	T2	T3	T4
Cheville (b)	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse (g)	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre (t)	≤ 105		≤ 130	
Hauteur (AG)	court ≤ 74 / normal > 74			



MI-BAS

Semi-opaque, Transparent, Homme

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet ^(c)	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55
Hauteur ^(AD)	court ≤ 37 / normal > 37				

Mesures adaptées

	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^(b)	16-18	18-20		20-23				23-26		26-29		29-33		
Mollet ^(c)	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^(AD)	court ≤ 37 / normal > 37													



BAS

Semi-opaque, Transparent

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	29-32
Cuisse ^(g)	43-58	48+63	53-68	58-73	63-78
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74				

Mesures adaptées

	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville ^(b)	16-18		18-20				20-23				23-26		26-29		29-32			
Cuisse ^(g)	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74																	



COLLANT

Semi-opaque, Transparent

Mesures adaptées

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^(g)	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Ventre ^(t)	≤ 105		≤ 130		
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74				

	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^(g)	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Ventre ^(t)	≤ 105			≤ 130		
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74					



VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





POUR LES MORPHOLOGIES HORS TABLEAU DE TAILLAGE DE SÉRIE, FABRICATION SUR-MESURE

Facturation forfaitaire :
même tarif quelle que soit
la morphologie

Calcul du tarif de remboursement
en ligne sans demande de devis

En 5 jours seulement
A découvrir page
(sommaire du sur-mesure p121)

Applicateur

Patient

Nom :
Code client :
Adresse :
CP : Ville :
Tel : Fax :
Email :
Date :


Nom du patient :

Homme Femme

Modèle

Mi-bas AD (paire) Bas antiglisse AG (paire)
 Bas antiglisse AF (paire) Collant AT (unité)

Gauche Droite

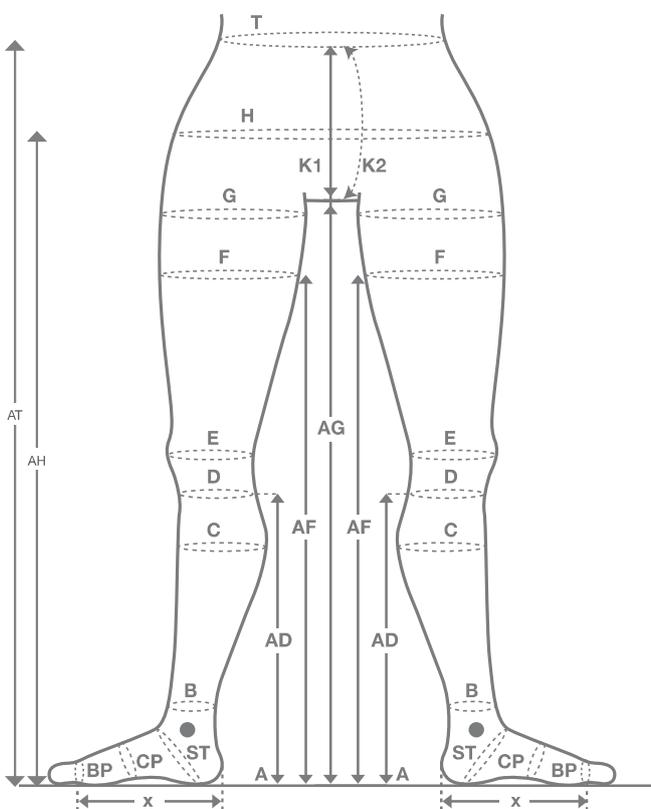

K1T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face ventrale
K2T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face dorsale

Demandes particulières :

.....
.....
.....
.....

Cachet

Prise de mesure

		Gauche	Droite
Bout de pied	BP		
Cou de pied	CP		
Talon	ST		
Cheville	B		
Mollet	C		
Jarret	D		
Cuisse	F		
Cuisse Maxi 80	G		
Hanche	H		
Taille	T		
Longueur Pied (sans orteils)	X		

Hauteurs

Mi bas	AD		
Bas Antiglisse	AG		
Bas Antiglisse	AF		
Collant	AH		
	AT		
	K1T		
	K2T		

Compression

Classe 2
 Classe 3

Couleur

Beige
 Noir

Pied

Ouvert Fermé

PRISE DE MESURE

Les mesures suivantes sont à prendre :

- en espace de confidentialité, sur peau
 - debout et sans chaussures
 - sur les deux jambes
 - de préférence le matin.
- Reprendre les circonférences à chaque renouvellement.

1 CHEVILLE point b

Tour de la cheville sur la partie la plus fine
(3 cm au dessus de la malléole)



2 MOLLET point c

Tour de mollet
sur la partie la plus large



3 CUISSE point g

Tour de cuisse
(5 cm sous le pli fessier)

Astuce : demander à la patiente la hauteur habituelle du positionnement de la bande anti-glisse selon ses habitudes de port, ce qui peut faire varier la circonférence de référence.



4 VENTRE point t

Tour de ventre au niveau ombilical.

5 HAUTEUR

Mi-bas AD

Distance entre le sol et 2 cm au dessus du galbe du mollet

Astuce : prendre le repère de la TTA
(Tubérosité Tibiale Antérieure)

Bas et collant AG

Distance entre le sol et l'entrejambe.



L'entretien

Afin de préserver la qualité des bas, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- Lavage quotidien à l'envers (à la main ou en machine) à une température maximum de 40°C.
 - Utilisation de détergents neutres pour tissus délicats.
 - Rinçage à une température maximum de 40°C.
 - Séchage ni au soleil ni au sèche-linge.
 - Éloigner des sources de chaleur.
 - Étendage exclusivement horizontalement.
- Un entretien régulier prolonge la durée de vie de vos bas de compression.



Lavage 40° max main ou machine



Pas de nettoyage à sec



Pas de sèche-linge



Pas d'eau de Javel




Pas de repassage

L'enfilage manuel

Pour améliorer l'observance, l'éducation à l'enfilage est primordiale.


- 1 Placez votre main à l'intérieur du bas, saisissez le talon avec le pouce et l'index.
- 2 Retournez le bas jusqu'au talon, en conservant le pied à l'endroit.

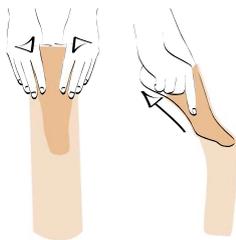

- 3 Élargissez le bas avec les deux pouces, introduisez le pied et positionnez le talon.



- 4 Saisissez le bas avec les deux mains, à 10 cm du pied, puis remontez le bas jusqu'à la cheville, sans tirer sur la bande dentelle.

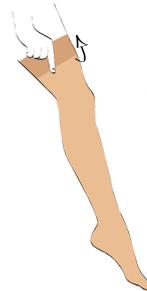

- 5 Renouvelez l'opération environ 4 fois pour remonter progressivement votre bas jusqu'en haut de la cuisse. Positionnez enfin la bande dentelle.



- 6 Repositionnez la pointe pour donner plus d'aisance aux orteils. Massez la jambe pour répartir la matière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le patient n'arrive pas à toucher la pointe de ses pieds, pensez à utiliser le Varitec[®] !

VARITEC[®] l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

▶ Vidéo d'utilisation

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medical



- Facile à utiliser
- Sans aucune aide ni besoin de force
- Adapté à toutes les classes de compression médicale

Référence : 34010 5149988 6

CLASSIFICATION CEAP

*Recommandations Haute Autorité de Santé 2010.

C0	C1	C2	C3		C4	C5	C6
Jambes lourdes, fourmillements	Télangiectasies (varicosités), varices réticulaires Diamètre < 3mm	Varices diamètre > 3mm	Œdème débutant	Œdème fibrosé	Troubles trophiques	Ulcère fermé	Ulcère ouvert non cicatrisé
							
15,6 %*	26,8 %*	32,8 %*	18,4 % des patients*		5,2 %*	0,2 %*	1 %*
Classe 1 (10-15 mmHg)							
Classe 2 (15-20 mmHg)							
Classe 3* (20-25 mmHg)							
						Classe 4* (> 36 mmHg) Superposition : Classe 1 + Classe 3 ou Classe 2 + Classe 2	
Tableau essentiellement symptomatique : • Lourdeurs de jambe, sensations de fourmillements • Œdème du pied en fin de journée • Télangiectasies (varicosités) symptomatiques	Tableau symptomatique et clinique : • Télangiectasies • Varices <3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Voyages aériens	<ul style="list-style-type: none"> • Varices >3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Œdèmes • Troubles trophiques (Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que Pigmentation et/ou eczéma veineux, Hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche). • Ulcère cicatrisé 				<ul style="list-style-type: none"> • Ulcère cicatrisé • Ulcère ouvert 	
			DEMA 	DEMA 	SOIE 		

Fibres naturelles

Peaux sensibilisées par la maladie veineuse : privilégier les fibres naturelles (soie et coton)
Varisan est le spécialiste du tricotage des fibres naturelles depuis 145 ans

Garanties OEKO-TEX




Toutes les gammes Varisan sont certifiées OEKO-TEX garantissant ainsi l'absence de substances nocives pour la peau et la santé des patients.



*Source : Enquête épidémiologique informative VARISAN. Analyse des données : GENBIOTECH Dijon - Août 2010

Rappel : La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.



La superposition de classe est recommandée lorsque le patient n'est pas capable d'enfiler une compression plus forte.

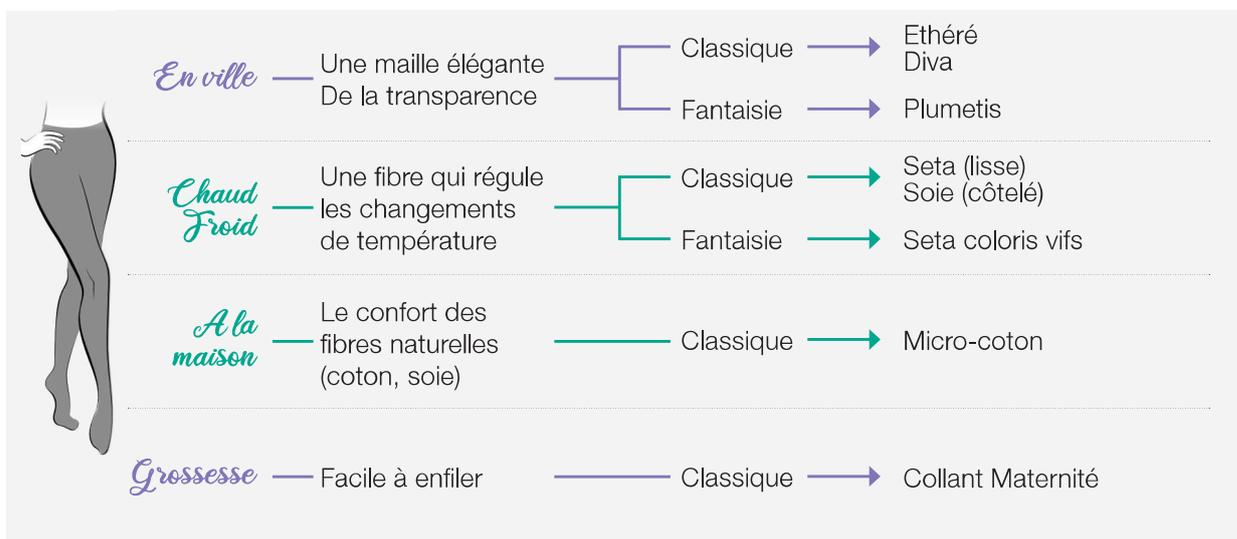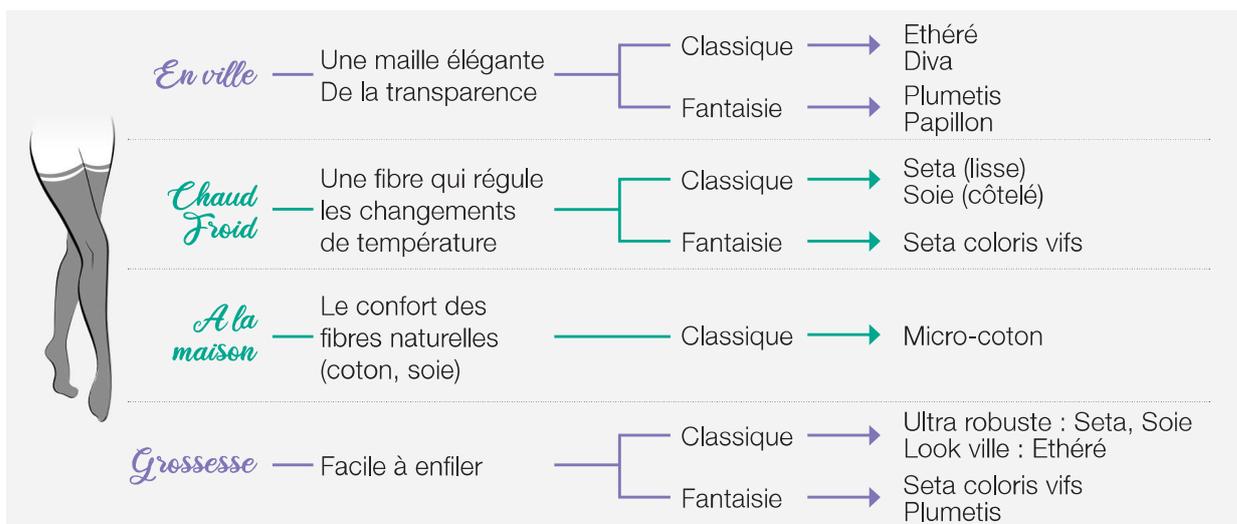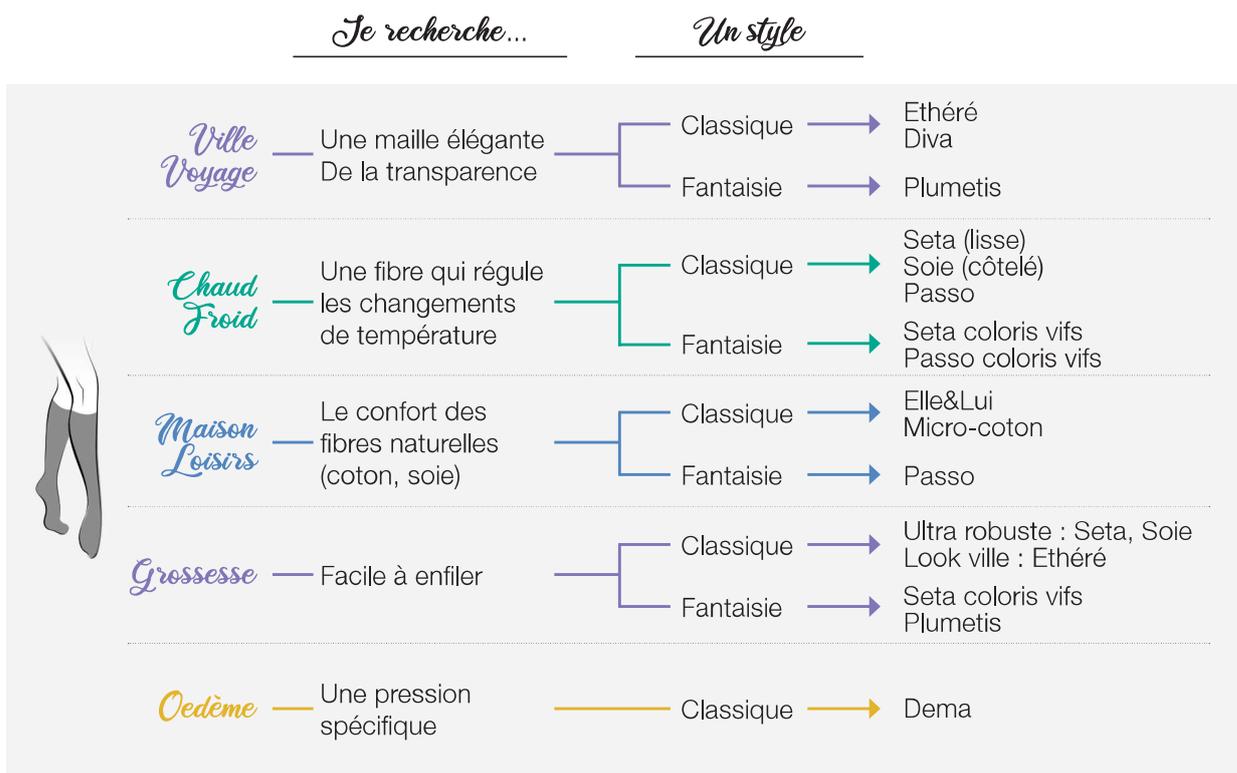

LA BONNE COMPRESSION AU BON MOMENT HOMME

Je recherche...

Un style

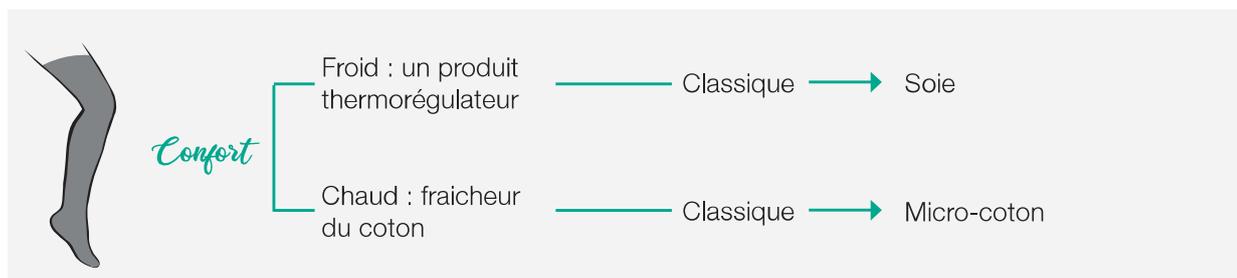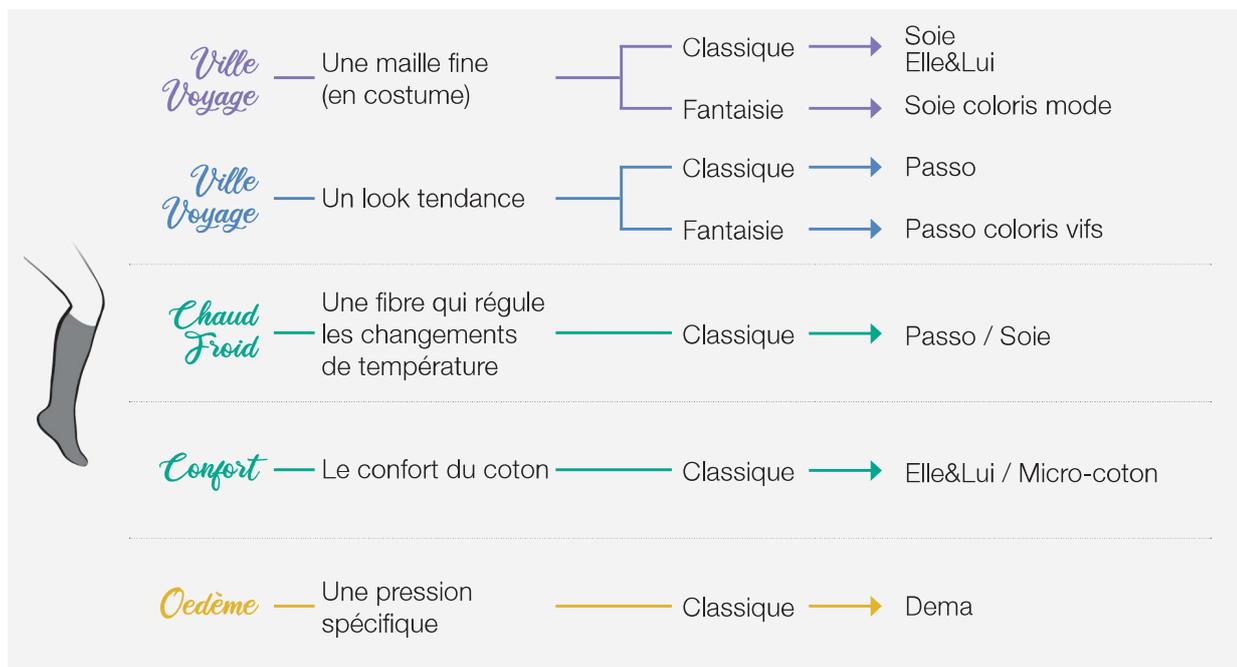


1

Présenter le bas talon face à l'enfile bas pointe vers le bas



2

Enfiler le bas ou mi-bas jusqu'à la couture du talon

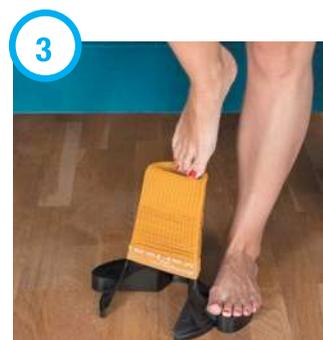

3

Maintenir l'enfile bas avec le pied opposé



4

Glisser la pointe du pied à l'intérieur du bas ou mi-bas au maximum




5

Retirer le pied de l'enfile bas



6

Remonter le bas ou le mi-bas sur le mollet ou la cuisse

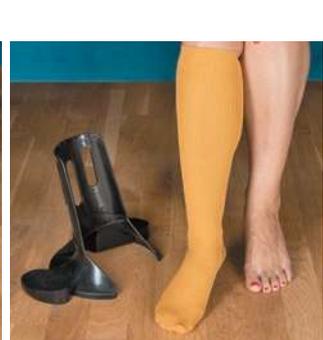

VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6

Les 4 saisons de la compression

Le nouveau lookbook des femmes et des hommes qui ont compris que les jambes légères ont leur place au vestiaire !

Printemps



Une touche d'éclat pour vos jambes en Plumetis Marine/Argenté et Noir/Rose. Pour des silhouettes pétillantes et éclatantes en référence au sequin disco



Envie de chaleur mais sans renoncer à la finesse et à l'élégance de l'opaque ? Seta Orage pour dynamiser un look classique

Été

Accords rosés et jeux de matières raffinées en Diva poudré



Passo vert ou Soie Prune pour donner du caractère à une tenue sobre

La Dolce Vita



Passo bleu pour dynamiser un Prince de Galles gris



Les meilleurs looks pour la ville

Vous avez carte blanche pour oser montrer vos jambes en affirmant haut et fort vos goûts !

Automne



Ethéré
Taupe
s'accorde
avec une
palette
camel,
cognac
et bruns

Alors qu'Ethéré
Orage donne
du chien à un
camaïeu de bleu
sombres ou noir
trop sobres

Ethéré Gris magnifie
l'intemporel pied-de-poule



Au placard le total look noir !
On ose le technicolor comme un rempart au froid
On tente l'association audacieuse et chic
de Passo rouge et Seta collant rouge

Hiver



Oh tristesse,
dès que les
températures
baissent, nos
gambettes se font
plus discrètes...
pas toujours !

En Seta collant
Rouge et Micro-
coton noir, les
matières naturelles
tiennent leurs
promesses et vous
entourent de confort
et de douceur !

UNE HISTOIRE DE QUALITÉ DEPUIS 145 ANS

CIZETA MEDICALI, spécialiste depuis 1872 dans la compression élastique, assure la conception et la fabrication de solutions innovantes dans la thérapie pour l'insuffisance veineuse et lymphatique.

En collaboration avec les plus grands centres de phlébologie, **CIZETA MEDICALI** est en permanente recherche pour améliorer la qualité du service médical rendu de ses produits. **CIZETA MEDICALI** a obtenu les 4 homologations des pays certificateurs



5 MARQUES

VARISAN
CIZETA *ortò*
CIZETA *care*
VIVA
CZ
COMPRESSION
ZONE

NOS CLIENTS

4100
officines et magasins
d'orthopédie partenaires

90
groupements
partenaires

3 MÉTIERS

PHLÉBOLOGIE
ORTHOPÉDIE
LYMPHOLOGIE

Cizeta Medicali est fabricant depuis 1872 de textile compressif, utilisé en compression médicale, lymphologie et orthopédie.

CHIFFRES CLÉS

CA multiplié par **2** en **5** ans

N°5
des fabricants de
compression veineuse

N°3
du marché du
semi-transparent
avec Ethéré

L'INNOVATION AU SERVICE DE L'OBSERVANCE


Parce que le confort, le taillant et l'esthétisme représentent les premiers freins à l'observance du traitement, 2% du chiffre d'affaires de **CIZETA MEDICALI** est dédié à la recherche et à l'innovation.

QUALITÉ


Label Premium Knitting Quality



Assemblage bord à bord de la dentelle
4 aiguilles : **pas de surépaisseur** et couture
de la dentelle sur le bas avec 6 fils pour **plus de résistance**

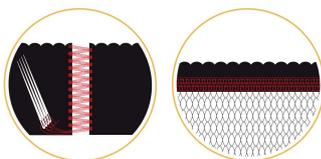


Forte résistance à la déchirure
et à l'abrasion pour une **durabilité élevée**

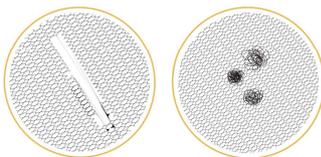


Profondeur du talon et bosselage
cou-de-pied : **enfilage aisé**



Couture pointe plate
éclatée : **pas de gêne**

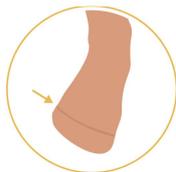

Silicone double composant
avec catalyseur platine
appliqué après teinture
pour une **meilleure tolérance cutanée**

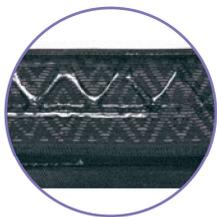


Polyamide microfibre
+ solide et + doux



INNOVATIONS

R2M

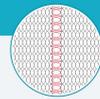

Le système R2M, (Reprise Maille par Maille), permet une finition **sans couture à la pointe de pied**. Cela consiste à tricoter une poche par diminution et augmentation à la pointe, puis à réaliser une fermeture sur le dessus du pied en Reprise Maille par Maille.

Disponible sur Passo.

Label Douceur



Ce label permet d'identifier les produits bénéficiant d'un fil polyamide microfibre de qualité supérieure, composé de 14 filaments minimum, offrant une douceur veloutée.

Disponible sur Diva.



Entretien facile

Lavage machine 40° à l'envers, quotidien pour prolonger la durée de vie

ESTHÉTISME & TAILLANT

Depuis plus d'un siècle, notre service recherche et développement s'attache à concevoir des produits alliant qualité et esthétisme, pour votre patientèle, féminine et masculine, afin de favoriser l'observance du traitement.

Un taillage adapté pour une prise en charge de l'ensemble des morphologies, le taillage de série de Varisan couvre 96,3% de la population féminine française.

SUR MESURE

Si les mesures de votre patient n'entrent pas dans les tableaux de mesures de nos articles de série, **CIZETA MEDICALI** met à votre disposition son savoir-faire en vous proposant la fabrication de bas sur-mesure (voir page 121)



5 BREVETS
Au service de l'observance

Bande Cizeta Press CP 35 Picots

Favorise l'autobandage



Veinalgic®

Prévention et traitement des effets secondaires
après sclérose des varices



Varitec

Enfile bas



CIZETA MEDICALI s'investit dans la recherche médicale autour de 2 piliers : la recherche clinique et le développement produits pour l'amélioration de la prise en charge.

- **La recherche clinique** est encadrée par une équipe composée de rééducateurs fonctionnels diplômés en phlébologie, lymphologie et spécialistes du handicap. La veille scientifique passe notamment par la participation de **CIZETA MEDICALI** aux manifestations médicales, et à son étroite collaboration avec des médecins réputés dans l'observation et l'accompagnement de l'évolution des pratiques.
- **Le développement produit et l'innovation** : nos ingénieurs textile et spécialistes des matières plastiques sont en recherche constante de matières et technologies innovantes, au profit d'une qualité de produit fini adapté aux pathologies et au quotidien des patients.

La validation des produits passe par des **tests et essais patients**, encadrés par des **études cliniques**.

L'objectif de cette démarche est de faire évoluer la prise en charge des patients sur les pathologies phlébologiques, lymphatiques et les atteintes musculo-squelettiques, à destination du corps médical et des applicateurs.

CIZETA MEDICALI attache une très grande importance au développement des compétences médicales de ses équipes en interne. Les délégués pharmaceutiques et médicaux ainsi que l'encadrement sont titulaires du Diplôme Universitaire de Compression Médicale.

▶ Vidéo innovation



▶ Vidéo Prix Galien



▶ Vidéo A2T®




▶ YouTube

Vidéos disponibles
sur la chaîne
Cizeta Medicali




LE SYSTÈME CIRCULATOIRE

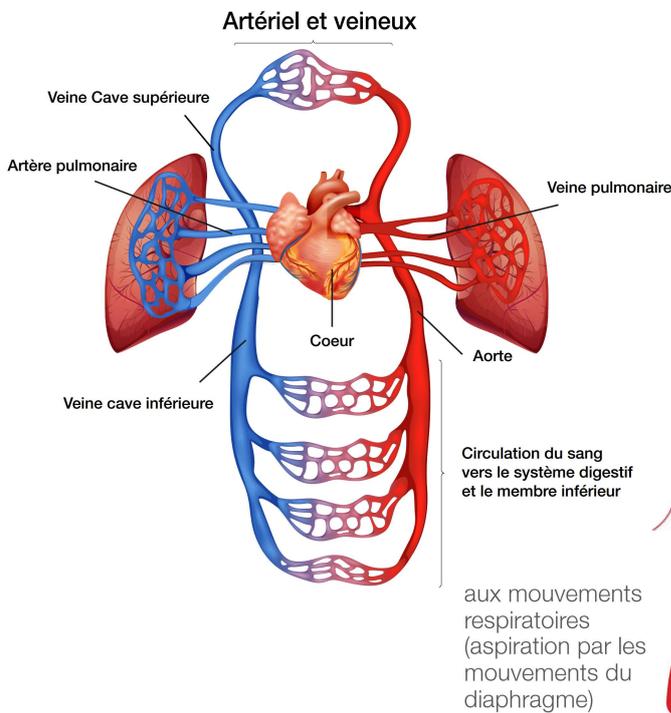

Le cœur propulse le sang chargé d'oxygène et de nutriments vers les organes grâce aux artères.

Les échanges gazeux et métaboliques s'opèrent par l'intermédiaire des réseaux de capillaires au niveau des organes et des muscles.


Les veines ramènent le sang appauvri en oxygène et chargé de déchets métaboliques vers le cœur. Le retour du sang vers le cœur est possible grâce :

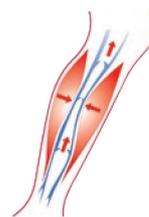

à la pompe musculaire du mollet (lors de la contraction des muscles)



à la pompe plantaire lors de la marche

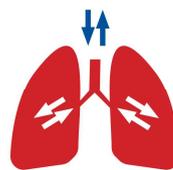

aux mouvements respiratoires (aspiration par les mouvements du diaphragme)

aux valvules des veines (clapets anti-retour)

LA MALADIE VEINEUSE

Touche plus de 22 millions de personnes en France. Plus d'une femme sur deux et un homme sur quatre sont concernés.

Seulement 1/3 des patients atteints se soignent.

En moyenne un patient va mettre 7.5 années à aller consulter un phlébologue.

Douleurs et lourdeurs sont les premiers symptômes, les varicosités (télangiectasies) sont les premiers signes cliniques.

La maladie veineuse peut avoir différentes origines. Son apparition et son évolution sont souvent amplifiées par des facteurs de risque et des situations aggravantes souvent méconnues.



Du point de vue physiologique, le sang remonte vers le cœur par le réseau veineux. Ce réseau veineux est pourvu en valvules.

Les valvules (clapets anti-reflux ou anti-retour) permettent de lutter contre la pesanteur et donc empêchent le sang de refluer.

22 millions
de personnes
en France

1 femme sur 2 & 1 homme sur 4

1 patient sur 3 se soigne

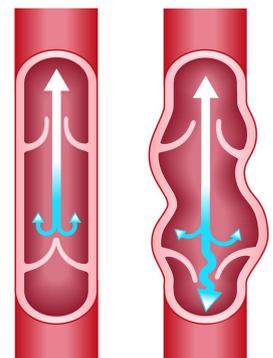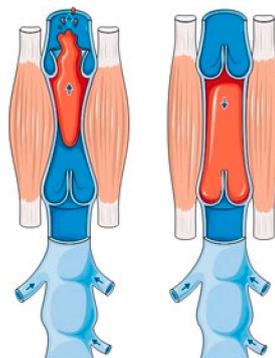

SYSTÈME CIRCULATOIRE ET MALADIE VEINEUSE

A l'origine de la maladie veineuse des membres inférieurs, on constate une dégradation de la paroi veineuse et une détérioration des valvules, qui provoquent une augmentation de la pression veineuse. Sous l'effet de cette pression, la veine se dilate et un reflux s'installe. Le sang stagne alors dans la veine et la déforme, provoquant l'apparition de varices.

Ces affections veineuses des membres inférieurs sont évolutives.

Sans traitement, elles peuvent engendrer des complications graves (ulcères, TVS* et TVP**,...).

LA COMPRESSION : TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE

Les bas médicaux de compression sont des bas élastiques (collant, bas et mi-bas) fabriqués dans du tricot élastique. Ils entourent le membre inférieur et exercent une pression active constante sur ce membre, qu'il soit au repos ou en mouvement.

Les bas médicaux exercent une pression dégressive : la pression exercée est plus forte à la cheville et diminue graduellement le long de la jambe.

La compression médicale favorise le retour veineux, prévient la stagnation du sang et lutte contre la détérioration de la paroi veineuse.


En effet la compression permet de rétablir l'équilibre au niveau des capillaires entre les pressions hydrostatique/oncotique capillaire et interstitielle (loi de Starling).

Premier effet immédiat, la compression médicale soulage les douleurs et les sensations de lourdeur en traitant en profondeur la maladie veineuse. Son efficacité est prouvée scientifiquement et reconnue par la Haute Autorité de Santé.

Selon la pathologie, la compression médicale peut être appliquée sous plusieurs formes : chaussettes, bas, collants mais également bandes.

Il existe plusieurs forces de compression allant de la classe I à la classe III en standard. La classe IV est réalisée sur mesure pour des cas bien particuliers notamment de lymphoedème. Les nouvelles textures (telles que la soie,...) et les coloris actuellement sur le marché facilitent l'observance du traitement prescrit.

Un bas médical de compression est une solution thérapeutique qui, pour être efficace, doit être portée. Le succès de cette thérapie reste lié à un geste simple et naturel : enfiler chaque matin ses bas médicaux de compression... Un acte quotidien qui doit être accompagné d'une bonne hygiène de vie.

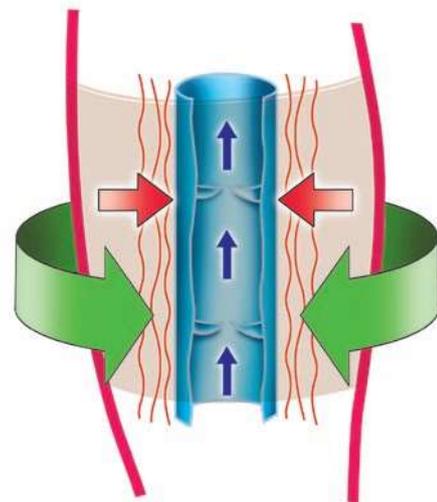

TVS* : Thrombose Veineuse Superficielle
TVP** : Thrombose Veineuse Profonde

FACTEURS DE RISQUES ET FACTEURS AGGRAVANTS

Ces facteurs combinés peuvent être à l'origine de situations à risque, mais ils pourraient jouer un rôle aggravant en cas d'expression de la maladie veineuse :



L'âge.

Le sexe avec une prédominance pour la femme.

La sédentarité.

L'obésité qui exerce une pression accrue sur le système veineux des membres inférieurs.



Les dérèglements hormonaux tels

que les grossesses multiples (pour des raisons mécaniques et hormonales). La prise de contraceptif oral, la ménopause et le traitement hormonal substitutif.



Toute cause d'alitement prolongée (> 3 jours).

Une affection cancéreuse.

Toute intervention chirurgicale récente (membres inférieurs, abdomen, petit bassin...).



L'hérédité avec 45% de risque de développer des varices si un parent est variqueux, 90% si les deux parents sont atteints.



Le syndrome de la classe économique (long voyage supérieur à 4 heures).



Les conditions de travail avec station debout ou assise prolongée, en ambiance chaude ou humide, le port répété d'objets lourds.

NOS CONSEILS

L'HYGIÈNE DE VIE


Une bonne hygiène de vie permet de diminuer les symptômes et les complications :



La marche régulière pour favoriser un bon retour veineux.




Les douches froides sur les jambes.

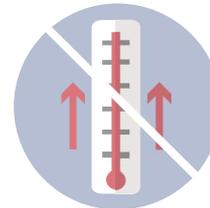

Éviter les sources de chaleur directes sur les jambes.




Surélever les jambes à la fin de la journée, dormir les pieds surélevés.

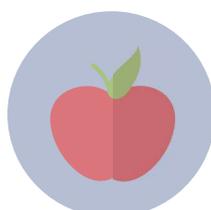

Veiller à avoir une alimentation équilibrée.



Porter quotidiennement sa compression veineuse.

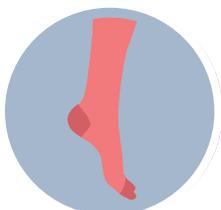

Faire des exercices talon pointe lorsque vous travaillez debout toute la journée.


LES CONTRE-INDICATIONS

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6 :

- La microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg).
- La phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- La thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9.
- neuropathie périphérique évoluée.
- dermatose suintante ou eczématisée.
- intolérance aux fibres utilisées.

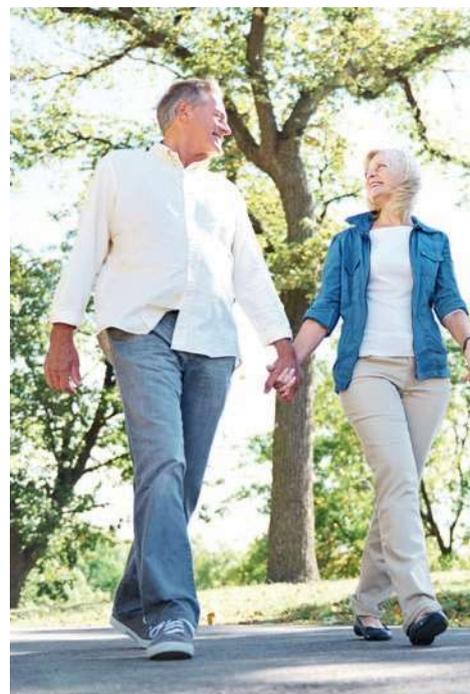

VARISAN®



Ethéré collant gris

*Ethéré bas
taupe et orage*

VARISAN®



Plumetis marine / argentè



Plumetis noir / rose

VARISAN®

La compression médicale
haute couture

Plumetis

Mes jambes légères **tendance sequins**

Anaëlle LECLERCQ
Jeune espoir du tennis féminin

Plumetis

●● **Noir / Rose**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**

NOUVEAU

Plumetis

●● **Marine / Argenté**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

Credit photo : Benjamin Vingpier

PLUMETIS



DIVA

VARISAN

CLASSE 2
15-20 mmHg

Transparent

La transparence veloutée

Transparence • Douceur • Résistance



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



Bande large pour plus de confort



Culotte galbante



Bande florale



Divia nacré

VARISAN®



Soie collant prune

Passo vert

VARISAN®

Diva bas terra

Passo moutarde

AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

CANNES ANGLAISES

CANNE CLASSIQUE
ADULTE



Vendu
par
paire

CANNE CONFORT
ADULTE



Vendu
par
paire

CANNE ENFANT



CANNES DERBY

CANNE POIGNET
T RÉGLABLE



CANNE PLIANTE
BI-MATIÈRE



CANNE PLIANTE
FANTAISIE



4 motifs



DÉAMBULATION

DÉAMBULATEUR
PLIANT



ROLLATEUR
2 ROUES



ROLLATEUR
4 ROUES



AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

FAUTEUILS

FAUTEUIL DE TRANSFERT



Disponible en 2 largeurs d'assise :
39 cm et 43 cm

FAUTEUIL ROULANT



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 46 cm et 51 cm

OREILLER ET MATELAS

OREILLER À MÉMOIRE DE FORME



MATELAS VISCOELASTIQUE



COUSSINS

COUSSIN PRÉVENTION ESCARRE



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 45 cm et 51 cm

COUSSIN POSITIONNEMENT DÉBUBITUS



**Demandez notre catalogue
et nos tarifs remisés**



ARBRES DÉCISIONNELS

Demandez notre catalogue Orthopédie



RACHIS LOMBAIRE



RACHIS CERVICAL

Soutien léger

Soutien semi-rigide

Immobilisation modérée

Immobilisation stricte

Torticolis
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Entorse bénigne
Entorse moyenne

Entorse moyenne
Entorse grave

ANATO C1



p.26

ANATO C2



p.26

ANATO C3



p.27

ANATO C4



p.27

ÉPAULE / BRAS

IMMOBILISATION ÉPAULE

GILET D'IMMOBILISATION



p.32

PERFO BRAS



p.30

ANNEAU CLAVICULAIRE



p.33

POLYESTE



p.33

COUSSIN D'ABDUCTION 20°



p.31

MAIN / POIGNET

Rhumatologie		Traumatologie		Traumatologie grave
Gamme ATL SEAMLESS		Gamme PERFO		MAIN
ATL SEAMLESS POUCE	ATL SEAMLESS POIGNET	PERFO POIGNET	PERFO POIGNET POUCE	MI 70
				
p.39	p.38	p.41	p.41	p.40

GENOU

Besoin de maintien		Reprise sportive et phase de rééducation			Immobilisation et Post-Op	
MAINTIEN LÉGER	MAINTIEN RENFORCÉ	MAINTIEN INTENSE	PHASE RÉÉDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE	POST-OP LCA ET RÉÉDUCATION	IMMOBILISATION APRÈS TRAUMATISME	
GL STAB	PATELLA STAB	GL STRAPP	GL 120 Standard	GL 120 Open	CIROM	PERFO UNI 3
						
p.48	p.49	p.49	p.46	p.47	p.50	p.51

CHEVILLE

Besoin de maintien			Reprise sportive et phase de rééducation		Immobilisation et Post-Op	
Maintien léger	Maintien renforcé	Maintien intense	Entorse moyenne à grave		Entorse grave et fracture	
TALO STAB	TALO PROTECT	TALO STRAPP	CISTAB	A2T®	CIZETA BOOTS	CIZETA BOOTS AIR
						
p.60	p.61	p.61	p.58	p.56	p.62	p.63

PIED

C.H.U.T CLASSIQUE	C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE	C.H.U.T DÉCHARGE AVANT
		
p.66	p.66	p.67
RELEVEUR DE PIED	CHAUSSURE PLÂTRE	RELEVEUR A2T NOUVEAU
		
p.68	p.67	p.68

CANNES ET ACCESSOIRES

CANNE CLASSIQUE	BANDAGE HERNIAIRE	PACK CHAUD / FROID
		
p.70	p.71	p.70
		COUSSIN BINET
		
		p.71